

Praxisname	QM-Hygiene AA – Verpacken - Klarsichtverpackung	Seite 1 von 2
		Datum: 20.07.2015

Verpackung von Medizinprodukten in Klarsichtverpackung

1. Ziel:

Ordnungsgemäße Verpackung von Medizinprodukten (MP) in Klarsichtverpackung

2. Geltungsbereich

Aufbereitungsbereich, reine Seite

3. Arbeitsmittel:

- Siegelgerät
- Sterilisationstüten, oder Schlauchmaterial

4. Arbeitsablauf:

Vorbereitung:

- 4.1 Nehmen Sie das Gerät nach Herstellerangaben in Betrieb
- 4.2 Die Siegelnahtbreite muss mindestens 8mm (DIN 58953 Teil 7) betragen
- 4.3 Schalten Sie das Gerät ein
- 4.4 Stellen Sie die Temperatur nach Herstellerangaben für die von Ihnen benutzte Verpackung ein (180°C)
- 4.5 Warten Sie die Aufheizzeit des Gerätes ab

Wenn die Siegelnahtfestigkeit nicht optimal ist, muss die Temperatur verändert werden

- Erhöhung → höhere Festigkeit
- Senkung → verminderte Festigkeit
- Ggf. muss auch der Anpressdruck der Siegelwalze durch einen Techniker verändert werden

Verpacken:

- 4.6 Wählen Sie die Verpackung nach dem verwendeten Sterilisationsverfahren und dem Sterilisiergut aus
- 4.7 Klarsichtverpackungen dürfen nur zu $\frac{3}{4}$ befüllt werden
- 4.8 Achten Sie beim Befüllen der Verpackung auf die Peelrichtung der Folie
- 4.9 Lassen Sie von der Siegelnaht bis zum Rand einen 3cm breiten Abstand für das sachgemäße Öffnen der Verpackung
- 4.10 Teile des Medizinproduktes dürfen nicht in die Siegelzone hineinragen
- 4.11 Verwenden Sie für spitze/scharfe MP einen Schutz gegen Durchstiche
- 4.12 Achten Sie bei einer Doppelverpackung darauf, dass ein ungehinderter Luftaustausch und bestmögliche Dampfdurchdringung gewährleistet ist (d.h. Papierseite auf Papierseite legen)

Siegeln:

- 4.13 Versiegeln Sie die Verpackung nach Herstellerangaben
- 4.14 Überprüfen Sie sowohl die Siegelnähte als auch die gesamte Verpackung auf optische Unversehrtheit

Erstellt Datum Zeichen	Geprüft Datum Zeichen	Genehmigt Datum Zeichen

Praxisname	QM-Hygiene AA – Verpacken - Klarsichtverpackung	Seite 1 von 2
		Datum: 20.07.2015

4.15 Kennzeichnen Sie den Inhalt mithilfe eines Etiketts, soweit dieser nicht ersichtlich ist (auf keinen Fall die Papierseite im Füllungsbereich beschriften)

Mitgeltende Unterlagen:

- Bedienungsanweisung des Siegelgerätes
- Herstellerangaben der Verpackungsmaterialien
- Wartungsunterlagen und Validierungsunterlagen des Siegelgerätes
- RKI-Leitlinie „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“

Erstellt Datum Zeichen	Geprüft Datum Zeichen	Genehmigt Datum Zeichen