

# Hinweise zur Anwendung und Handhabung von Klarsichtbeuteln und -schläuchen nach EN 868-5 ISO 11607-1 sowie des „Seal - Check“

## Anwendungshinweise

Klarsichtbeutel und Klarsichtschläuche dienen als Verpackung für medizinische Produkte, die dampf- oder gassterilisiert werden sollen.

Versiegeln Sie das offene Ende mit einem Durchlauf- oder Impulssiegelgerät bei der empfohlenen Temperatur. (170 - 185°C, Druck 90 – 120 N/mm<sup>2</sup>)

Die Verpackung darf nur einmal benutzt werden.

Der Inhalt ist steril wenn:

die Indikatorstreifen im Inneren der Verpackung braun gefärbt sind bei Dampfsterilisation,

die Indikatorstreifen im Inneren der Verpackung gelb gefärbt sind bei Gassterilisation,

und die Packung nicht beschädigt ist.

Zur Qualitätssicherung der Kombination Folien und Folienschweißgeräte ist arbeitstäglich ein sog. „**Seal-Check**“ durchzuführen.

## Lagerungsbedingungen

Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht und zu große Hitze.

Empfohlen werden folgende Werte:	Temperatur	10 – 30°C
	Luftfeuchtigkeit	30 – 70%