

## Datenblatt

### Bowie & Dick Test

ISO 11140-4

100 Indikatoren  
innerhalb der  
Verpackung

Stand: 01-2022

**Einsetzbar in jedem validierten Prozeß aufgrund der Herstellung nach DIN**

Beschreibung des Produktes	Der Bowie & Dick Test simuliert ein 7kg Wäschepaket
Anwendung des Produktes	<p>Der Bowie &amp; Dick Test sollte in einem separaten Programm des Autoklaven durchgeführt werden. Er ist auf dem untersten Tray zu platzieren.</p> <p>Die Testdurchführung erfolgt bei 134°C mit einer Haltezeit von 3,5 Minuten, oder bei 121°C mit einer Haltezeit von 15 Minuten. Der Indikatorbogen in der Mitte des Paketes muß einheitlich und komplett umschlagen.</p> <p>Sollte das nicht der Fall sein, ist dieses zu dokumentieren.</p> <p>Im Wiederholungsfall ist der Autoklav bis nach der Prüfung durch einen qualifizierten Techniker stillzulegen.</p> <p>Das rückseitige Etikett des Bowie &amp; Dick Testes ist mit einem Indikator versehen, welcher von rosa nach schwarz umschlägt.</p> <p>Somit wird Doppelgebrauch vermieden.</p> <p>Dokumentieren Sie alle Ergebnisse.</p>
Lagerung des Produktes	Weder Licht noch Hitze aussetzen. Bei +10°C bis +40°C sowie relativer Feuchtigkeit von 30% bis 60% aufbewahren.
Technische Daten des Produktes	Bowie & Dick Testpaket nach ISO 11140-4, gebrauchsfertig Material: Pappe mit Spezialbeschichtung, Spezialpapier Komplette und gleichmäßige Verfärbung nach schwarz notwendig
Verpackung des Produktes	Pappschachtel mit 1 Indikator, gebrauchsfertig Beschriftung: LOT + Verfall