

Datenblatt

**Type-5
 Integrator**

ISO 11140-1

**100 Indikatoren
 zur Einbringung
 in die Verpackung**

Stand: 01-2022

Einsetzbar in jedem validierten Prozeß aufgrund der Herstellung nach DIN

Beschreibung des Produktes	Chemischer Integrator zur Überprüfung der 3 kritischen Parameter - Zeit, Temperatur, Dampf - innerhalb von Trays, Containern oder Sterilverpackungen.
Anwendung des Produktes	Der Integrator wird in jedes Tray, Container oder jede Sterilverpackung (Papier/Folie) eingelegt. So können Sie prüfen, ob während des Programmablaufs innerhalb aller Verpackungen die gleichen Bedingungen vorhanden sind. Achten Sie bitte auf die korrekte Beladung des Autoklaven gemäß Herstellerangaben ! Die Verpackungen können nur dann als steril angesehen werden, wenn die Testfelder von pink nach schwarz bzw. von blau nach rosa umgeschlagen sind. Dokumentieren Sie die Ergebnisse auf der Rückseite und archivieren Sie diese.
Lagerung des Produktes	Weder Licht noch Hitze aussetzen. Bei +10°C bis +40°C sowie relativer Feuchtigkeit von 30% bis 60% aufbewahren.
Technische Daten des Produktes	Type-5 Integrator nach ISO 11140-1 Material: Spezialpappe mit Spezialbeschichtung Korrekte Verfärbung: von pink zu schwarz, von blau zu rosa
Verpackung des Produktes	Pappschachtel mit 100 Integratoren, aufklappbar Beschriftung: LOT + Verfall